



TAPPETO PER TEST DI FUKUDA E DI ROMBERG

Il Test della marcia di Fukuda


Il Test di Fukuda si utilizza per valutare in soggetti sani il riflesso nucale, cioè come estensori e rotatori influenza il tono posturale e quindi la presenza di una contrattura da un lato del corpo. Il test si esegue facendo marciare sul posto il soggetto per 50 passi ad occhi chiusi, con le braccia tese, sollevando le gambe di 45°, con la testa in posizione neutra, la mandibola in posizione di riposo, a piedi nudi. Infine si valutano i gradi di rotazione del paziente rispetto alla posizione di partenza.

Grazie al tappeto realizzato dalla Microlab è possibile oggettivare in modo preciso le misure degli angoli, rispetto al metodo convenzionale, rendendo la misura ripetibile grazie ai punti di riferimento grafici. Il tappeto, oltre alle misure angolari, grazie ai righelli posti sui bordi, consente di valutare gli spostamenti sul piano sagittale e longitudinale del paziente.

Il test di Romberg posturale

Il Test del Romberg Posturale serve per valutare la componente statica otolitica del Sistema Vestibolare. Si esegue con il soggetto in posizione ortostatica, con i piedi disposti a 30°, senza tensioni muscolari e le braccia tese in avanti. Si fanno chiudere gli occhi e si attendono 20-30 sec.

Anche per questo tipo di test il tappeto si rende utile per il posizionamento dei piedi del paziente, utilizzando le sue guide grafiche.

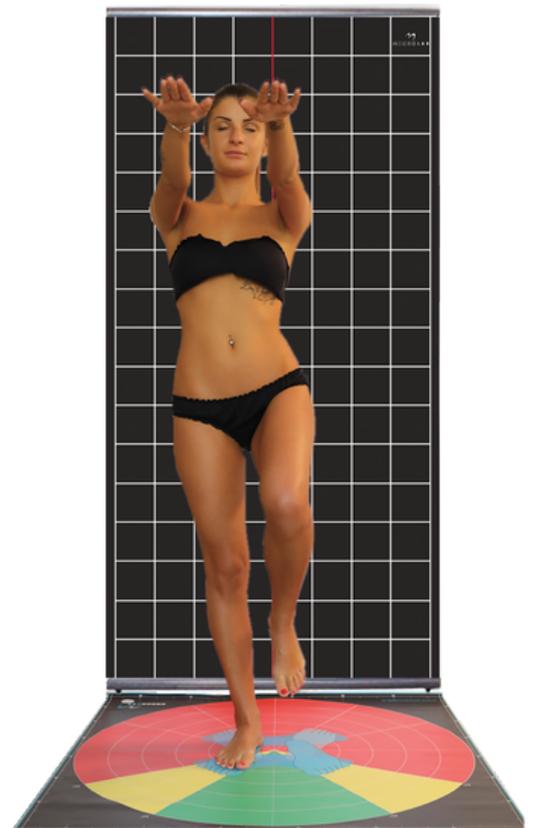

Caratteristiche:

Dimensioni: 100x100cm

Grafica: a colori

Materiale: PVC flessibile

Tappetino calpestabile e lavabile

Microlab di Angelo Vannella - Via P. Colombo, 3 - 20871 Vimercate MB



+39 0396080924



info@avmicrolab.it



www.avmicrolab.it